



OrCam Read Smart, machine à lire portable et intelligente au format stylo

Dispositif de lecture de poche offrant une grande mobilité grâce à une conception format stylo et ses options intelligentes.



2 099,00 €

Sommaire

[Présentation](#)

[Ergonomique et simple d'emploi](#)

[La fonction SMART d'OrCam Read](#)

[Avantages d'OrCam Read Smart](#)

[Caractéristiques techniques](#)

[Tutoriels vidéo](#)

[Téléchargement](#)

[Produits similaires](#)

Présentation

OrCam Read Smart est la nouvelle solution vocale pour lire tout texte dactylographié de près comme de loin. Intégré dans un mini-boîtier format stylo, il suffit de pointer l'appareil vers ce que l'on veut lire, d'appuyer et d'écouter. La lecture se fait par le biais d'un haut-parleur intégré, des écouteurs filaires ou Bluetooth. Fonctionnant sur tous textes imprimés, OrCam Read est principalement destiné aux personnes malvoyantes ou dyslexiques. Il est possible d'utiliser cette aide en toutes situations: intérieur/extérieur, magasins, restaurants, écrans, etc...

Ergonomique et simple d'emploi

OrCam Read Smart est extrêmement simple à utiliser, avec seulement quatre boutons, chacun de forme différente. Il se tient en main comme un stylo, de sorte que le doigt se retrouve naturellement sur le bouton rond servant à déclencher la lecture. Dans le cas d'une page de magazine ou d'une feuille au format A4 posée sur une table, placez la pointe de l'appareil au centre de la feuille, levez-le doucement de 30 à 40 centimètres et appuyez sur le bouton. Le temps de quelques signaux sonores et la lecture se fait dans les secondes qui suivent ! Si vous avez un restant visuel, le laser rouge vous indique toujours la zone photographiée et vous permettra

Accessolutions

24 rue Lamartine - - 38320 Eybens

France

contact@accessolutions.fr - 01 43 44 02 02

Page: 1 / 2

également de cibler une zone particulière à lire.

La fonction SMART d'OrCam Read

La fonction Smart ajoute l'analyse intelligente du texte à l'OrCam Read, de même que des possibilités de reconnaissance supplémentaire. Grâce à elle, il est possible de demander vocalement de lire uniquement les prix, les horaires, de cibler un paragraphe, ou encore lire les titres. La fonction Smart propose même l'identification des billets de banque et de code-barres.

Avantages d'OrCam Read Smart

- Sans fil
- Détecte et lit automatiquement les textes en caractères d'imprimerie (livre, journal, SMS, texte sur ordinateur, pancarte,...)
- Alerte en cas de faible luminosité
- Rechargeable par port USB C
- Détection automatique de la langue
- Fonction Mart pour lire des zones de texte particulières, des billets de banque et des code-barres.

Caractéristiques techniques

- Pointeur laser pour sélection de la zone de lecture
- 2 formats de pointeur laser : fenêtre / spot
- Batterie intégrée
- Boutons physiques
- Prise Jack pour brancher des écouteurs filaires
- Rechargeable par port USB-C
- Fourni prêt à l'emploi avec chargeur USB, câble, notice imprimée
- Dimension : longueur 122 mm
- poids : 45 g
- Garantie : 2 ans

Tutoriels vidéo

1. Ouverture du coffret
2. Paramètres audio de l'OrCam Read
3. Parties et boutons de l'OrCam Read
4. Lecture intelligente de OrCam
5. Bien commencer avec l'OrCam Read
5. Lecture de textes avec OrCam Read
7. Connection Bluetooth avec OrCam Read
3. Conseils d'utilisation d'OrCam Read